

## INSTRUCCIONES DE USO

### EBGLYSS™ [EB-glis] (lebrikizumab-lbkz)

inyección para uso subcutáneo

Pluma Precargada de Dosis Única

Estas Instrucciones de Uso contienen información sobre cómo inyectar EBGLYSS.

**Antes de utilizar la Pluma Precargada de EBGLYSS (Pluma), lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso a paso.**



#### Información importante que debes saber antes de inyectarte EBGLYSS


- El profesional de la salud debe mostrarte cómo preparar e inyectar EBGLYSS con la Pluma. **No** te inyectes a ti mismo ni a otra persona hasta que se te haya mostrado cómo inyectar EBGLYSS.
- Conserva estas Instrucciones de Uso y consúltalas cuando sea necesario.
- Cada Pluma de EBGLYSS contiene 1 dosis de EBGLYSS. **La Pluma es de un solo uso.**
- La Pluma de EBGLYSS tiene partes de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se cae sobre una superficie dura, **no** la uses. Utiliza una Pluma de EBGLYSS nueva para tu inyección.
- El profesional de la salud te puede ayudar a decidir en qué parte del cuerpo te inyectarás la dosis. También puedes leer la sección “**Elige y limpia el lugar de la inyección**” de estas instrucciones para ayudarte a elegir cuál área puede funcionar mejor para ti.
- Si tienes problemas de visión o audición, **no** utilices la Pluma de EBGLYSS sin la ayuda de un cuidador.
- Consulta “**Almacenamiento de EBGLYSS**” para obtener información importante sobre el almacenamiento.

## INSTRUCCIONES DE USO


Antes de utilizar la Pluma de EBGLYSS, lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso a paso.

### Partes de la Pluma de EBGLYSS

▲  
Parte superior

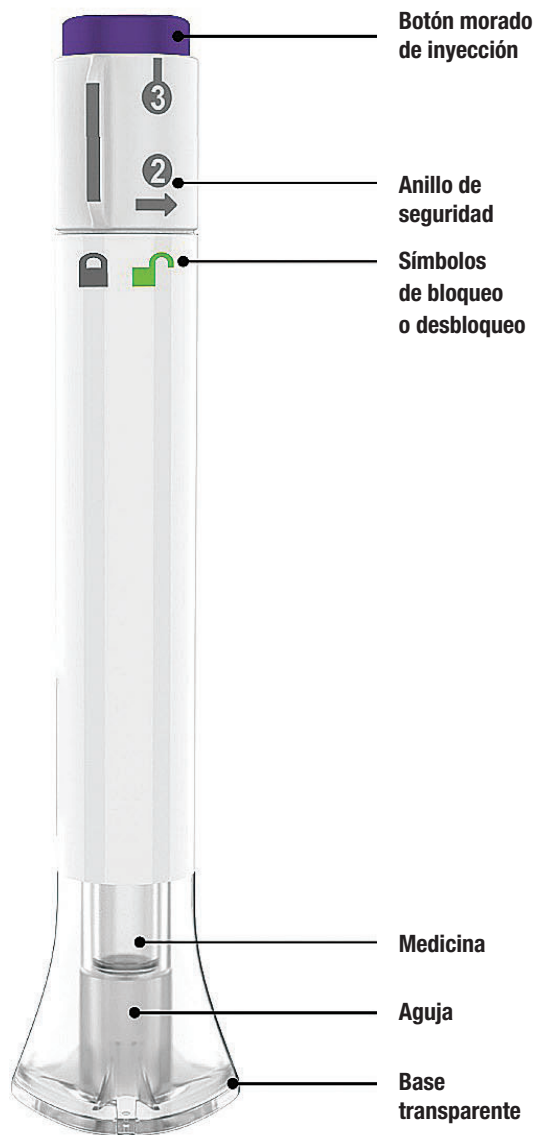

▼  
Parte Inferior y  
Extremo de la Aguja

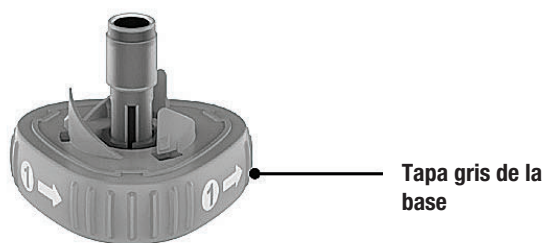

## Preparación para inyectar EBGLYSS

### Reúne los suministros y la Pluma de EBGLYSS:

- Pluma de EBGLYSS del refrigerador.
- 1 paño con alcohol.
- 1 bola de algodón o trozo de gasa.
- 1 recipiente para desechar objetos cortopunzantes (Consulta “**Eliminación de EBGLYSS**”).

### Espera 45 minutos

Con la **tapa gris de la base puesta**, deja que la Pluma alcance la temperatura ambiente durante 45 minutos antes de la inyección.

- **No** calientes la Pluma en el microondas, en agua caliente ni bajo la luz solar directa.
- **No** uses la Pluma si la medicina está congelada.

### Inspecciona la Pluma y la medicina

Asegúrate de que tienes la medicina correcta. La medicina en el interior debe ser transparente. Podría ser de incolora a ligeramente amarilla a ligeramente marrón.



**No** uses la Pluma (consulta “**Eliminación de EBGLYSS**”) en los siguientes casos:


- La Pluma parece estar dañada.
- La medicina está turbia, no tiene color o presenta partículas.
- La fecha de vencimiento impresa en la etiqueta ya pasó.

### Lávate las manos con agua y jabón


### Elige y limpia el lugar de la inyección

Tu profesional de la salud puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti.

**Limpia el lugar de inyección con una toallita con alcohol y deja que se seque.**

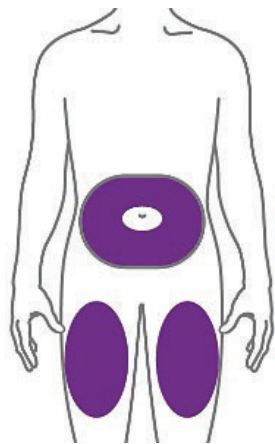

Tú u otra persona podrían realizar la inyección en estas zonas.

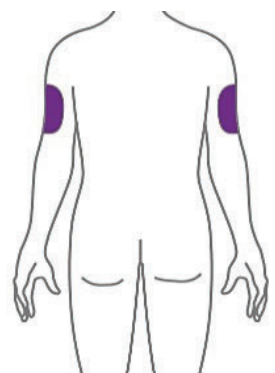

La inyección en esta área debe realizarla otra persona.

- **Zona del estómago (abdomen):**  
Como mínimo a 2 pulgadas de distancia del ombligo.
- **Parte delantera del muslo:**  
Como mínimo a 2 pulgadas por encima de la rodilla y a 2 pulgadas por debajo de la ingle.


- **Zona posterior de la parte superior del brazo:**  
La inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo debe aplicarla otra persona.

**No** te inyectes siempre en el mismo lugar.

**No** te inyectes en un área de la piel que sea delicada, tenga hematomas, esté enrojecida o dura, o que esté afectada por eccemas (dermatitis atópica) u otras lesiones de la piel.

# Inyección de EBGLYSS

## 1 Destapa la Pluma

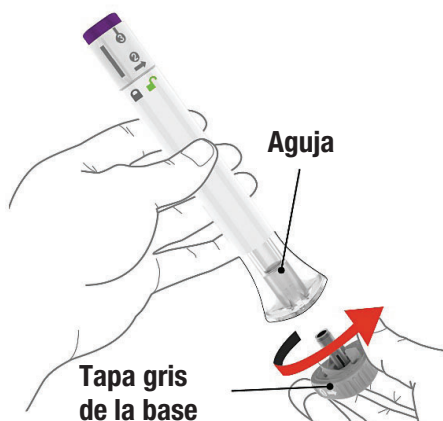

Asegúrate de que la Pluma esté **bloqueada**.




Cuando estés listo para la inyección, gira la tapa gris de la base y deséchala en la basura doméstica.

**No** vuelvas a colocar la tapa gris de la base, ya que podrías dañar la aguja.

**No** toques la aguja dentro de la base transparente.


## 2 Colócala y desbloquéala

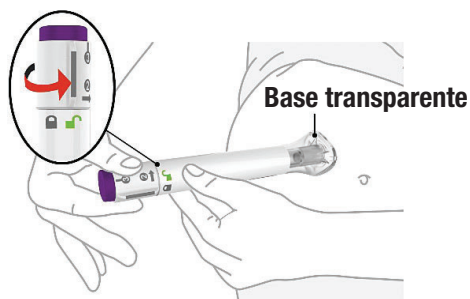

**Coloca** y mantén la base transparente plana y firme contra la piel.

Mantén la base transparente contra la piel. Luego, gira el anillo de seguridad a la posición de **desbloqueo**.

## 3 Mantén presionado por un máximo de 15 segundos

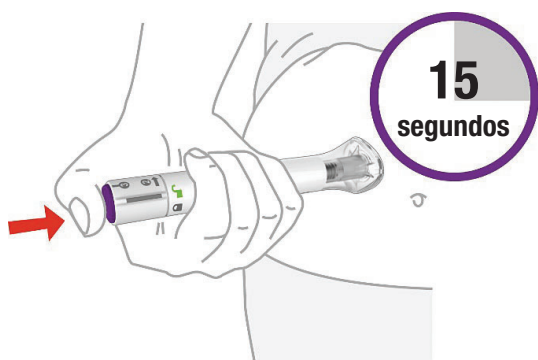

**Mantén presionado** el botón morado de inyección y **escucha** hasta que suenen 2 clics fuertes:

- Primer clic: Se inició la inyección.
- Segundo clic: Se completó la inyección.


La inyección podría tardar hasta 15 segundos.

Sabrás que te administraste la inyección completa cuando veas el émbolo gris.



## Eliminación de EBGLYSS

### Desecha (elimina) la Pluma utilizada

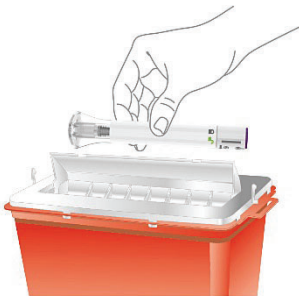

Inmediatamente después de utilizar la Pluma de EBGLYSS, colócala en un recipiente para desechar objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

**No** deseches (elimines) la Pluma de EBGLYSS en la basura doméstica.

Si no tienes un recipiente para eliminación de objetos punzantes autorizado por la FDA, puedes utilizar un recipiente de basura del hogar que:

- esté hecho de plástico de alta resistencia;
- pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
- pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
- sea resistente a filtraciones; y
- esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de que el recipiente contiene residuos peligrosos.

Cuando el recipiente para desechar objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberás seguir las normas de la comunidad para desecharlo correctamente.

Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringuillas usadas.

Para obtener más información sobre cómo desechar de manera segura objetos cortopunzantes e información específica sobre cómo desecharlos en el estado en el que resides, consulta el sitio web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.

**No** recicles el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes usado.

## Preguntas Frecuentes

**P. ¿Qué sucede si veo burbujas de aire en la Pluma?**

R. Las burbujas de aire son normales. No te harán daño ni afectarán tu dosis.

**P. ¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando retiro la tapa gris de la base?**

R. Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal. No te hará daño ni afectará tu dosis.

**P. ¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón morado de inyección antes de quitar la tapa gris de la base?**

R. **No** retires la tapa gris de la base. Desecha (elimina) la Pluma y usa una nueva.

**P. ¿Debo mantener presionado el botón morado de inyección hasta administrar completamente la inyección?**

R. No es necesario mantener presionado el botón morado de inyección, pero podría ayudarte a mantener la Pluma firme y estable contra tu piel.

**P. ¿Qué debo hacer si la aguja no se retrae después de la inyección?**

R. **No** toques la aguja ni reemplaces la tapa gris de la base. Guarda la Pluma en un lugar seguro para evitar un pinchazo accidental y comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener instrucciones sobre cómo devolver la Pluma.

**P. ¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?**

R. Es normal. Presiona la zona de inyección con una bola de algodón o una gasa. **No** frotes el lugar de inyección.

**P. ¿Cómo puedo saber si mi inyección está completa?**

R. Después de presionar el botón morado de inyección, oírás 2 clics fuertes. El segundo clic fuerte te indica que la inyección está completa. También verás el émbolo gris en la parte superior de la base transparente. La inyección podría tardar hasta 15 segundos.

**P. ¿Qué sucede si retiro la Pluma Precargada antes del segundo clic fuerte o antes de que el émbolo gris deje de moverse?**

R. Podrías no haber recibido la dosis completa. **No** apliques otra inyección. Llama a tu profesional de la salud para recibir asistencia.

**P. ¿Qué pasa si escuché más de 2 clics durante la inyección: 2 clics fuertes y 1 suave? ¿Me administré la inyección completa?**

R. Algunas personas podrían escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Este es el funcionamiento normal de la Pluma Precargada. **No** quites la Pluma Precargada de tu piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

**Si tienes más preguntas sobre cómo utilizar la Pluma de EBGLYSS, haz lo siguiente:**

- Llama a tu profesional de la salud
- Llama al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979)
- Visita [www.ebglyss.com](http://www.ebglyss.com)



Escanea este código para  
ir al sitio web [www.ebglyss.com](http://www.ebglyss.com)

## Almacenamiento de EBGLYSS

- Guarda tu Pluma en el refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C).
- EBGLYSS se puede almacenar a temperatura ambiente por un máximo de 7 días en el envase original. **No** las almacenes a más de 86 °F (30 °C). Desecha EBGLYSS que haya estado a temperatura ambiente por más de 7 días.
- Almacena tu Pluma en el envase original para protegerla de la luz hasta el momento de su uso.
- **No** congeles tu Pluma. **No** agites la Pluma.
- **No** pongas la Pluma en el microondas, no dejes correr agua caliente sobre ella ni la dejes bajo la luz solar directa.
- Desecha (elimina) tu Pluma si no se cumple alguna de las condiciones anteriores.

**Mantén tu Pluma y todas las medicinas fuera del alcance de los niños.**

**Lee la Información del Paciente de EBGLYSS dentro de esta caja para obtener más información sobre la medicina.**

*Lilly*

Eli Lilly and Company  
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.  
Número de Licencia en Estados Unidos: 1891

EBGLYSS es una marca comercial de Eli Lilly and Company.  
Derechos de autor © 2024, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.  
Emitido: Septiembre del 2024

EBG-0001-PEN-IFU-202409

PP-LK-US-0420