


INSTRUCCIONES DE USO

EBGLYSS™ [EB-glis]

(lebrikizumab-lbkz)

inyección para uso subcutáneo

Jeringuilla Precargada de Dosis Única con Protector de Aguja

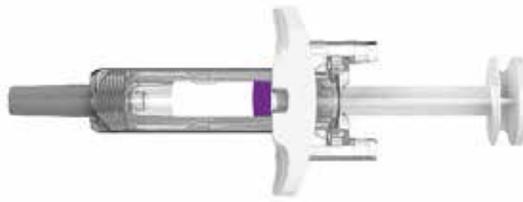

Estas Instrucciones de Uso contienen información sobre cómo inyectar EBGLYSS.

Antes de utilizar la Jeringuilla Precargada con Protector de Aguja de EBGLYSS (Jeringuilla), lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso a paso.

Información importante que debes saber antes de inyectarte EBGLYSS


- El profesional de la salud debe mostrarte cómo preparar e inyectar EBGLYSS con la Jeringuilla Precargada. **No** te inyectes a ti mismo ni a otra persona hasta que se te haya mostrado cómo inyectar EBGLYSS.
- Conserva estas Instrucciones de Uso y consúltalas cuando sea necesario.
- Cada Jeringuilla Precargada de EBGLYSS contiene 1 dosis de EBGLYSS. **La Jeringuilla Precargada es para un solo uso.**
- La Jeringuilla Precargada de EBGLYSS tiene partes de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se cae sobre una superficie dura, **no** la uses. Utiliza una Jeringuilla Precargada de EBGLYSS nueva para tu inyección.
- El profesional de la salud te puede ayudar a decidir en qué parte del cuerpo te inyectarás la dosis. También puedes leer la sección **“Elige y limpia el lugar de la inyección”** de estas instrucciones para ayudarte a elegir cuál área puede funcionar mejor para ti.
- Si tienes problemas de visión, **no** utilices la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS sin la ayuda de un cuidador.
- Consulta **“Almacenamiento de EBGLYSS”** para obtener información importante sobre el almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO


Antes de utilizar la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS, lee y sigue cuidadosamente todas las instrucciones paso a paso.

Partes de la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS con Protector de Aguja

Antes de Usar

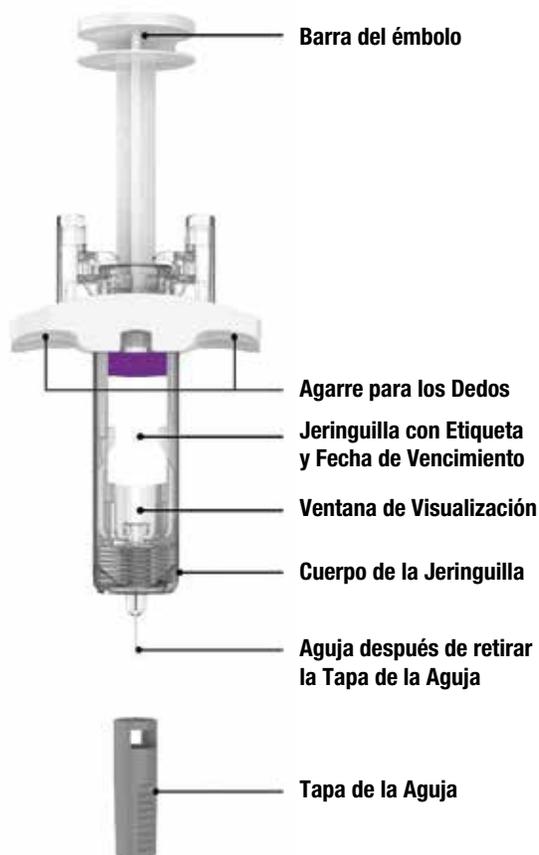

Después de Usar

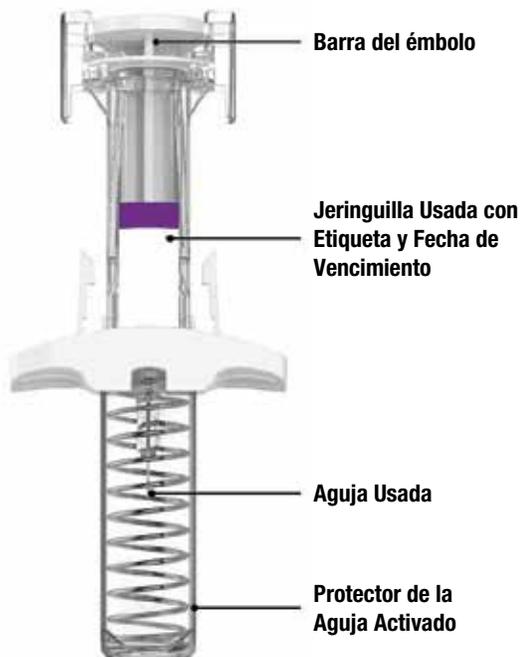


Preparación para inyectar EBGLYSS

Reúne los Suministros necesarios, incluida la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS

- Jeringuilla Precargada de EBGLYSS del refrigerador.
- 1 paño con alcohol.
- 1 bola de algodón o trozo de gasa.
- 1 recipiente para desechar objetos cortopunzantes (Consulta “**Eliminación de EBGLYSS**”).

Retira la Jeringuilla Precargada del envase

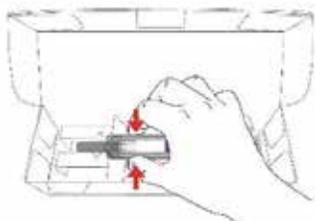

Retira la Jeringuilla Precargada EBGLYSS del envase sujetándola por la parte central del Cuerpo de la Jeringuilla y, a continuación, coloca la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS sobre una superficie plana y limpia.

Deja la tapa de la aguja en la jeringuilla hasta que estés listo para inyectar.

No tires hacia atrás de la Barra del Émbolo en ningún momento.

Espera 45 minutos

Con la Tapa de la Aguja puesta, deja que la Jeringuilla Precargada alcance la temperatura ambiente durante 45 minutos antes de la inyección.

- **No** calientes la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS en el microondas, en agua caliente ni bajo la luz solar directa.
- **No** uses la Jeringuilla Precargada si la medicina está congelada.

Inspecciona la Jeringuilla Precargada y la medicina

Asegúrate de que tienes la medicina correcta. La medicina en el interior debe ser transparente. Podría ser de incolora a ligeramente amarilla a ligeramente marrón. Algunas burbujas de aire son normales.



Nota: Puedes girar suavemente la barra del émbolo para ver la etiqueta de la jeringuilla, si es necesario.


No uses la Jeringuilla Precargada (consulta “Eliminación de EBGLYSS”) en los siguientes casos:

- Falta la Tapa de la Aguja o no está bien puesta.
- La Jeringuilla Precargada parece estar dañada.
- La medicina está turbia, no tiene color o presenta partículas.
- La fecha de vencimiento impresa en la etiqueta ya pasó.

Lávate las manos con agua y jabón


Elige y limpia el lugar de la inyección

Tu profesional de la salud puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti. **Limpia el lugar de inyección con una toallita con alcohol y deja que se seque.**

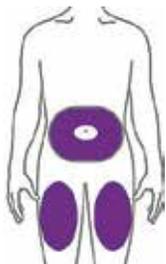

Tú u otra persona podrían realizar la inyección en estas zonas.

- **Zona del estómago (abdomen):**
 - Como mínimo a 2 pulgadas de distancia del ombligo.
- **Parte delantera del muslo:**
 - Como mínimo a 2 pulgadas por encima de la rodilla y a 2 pulgadas por debajo de la ingle.

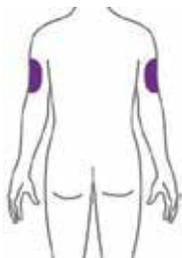

La inyección en esta área debe realizarla otra persona.


- **Zona posterior de la parte superior del brazo:**
 - La inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo debe aplicarla otra persona.

No te inyectes siempre en el mismo lugar.

No te inyectes en un área de la piel que sea delicada, tenga hematomas, esté enrojecida o dura, o que esté afectada por eccemas (dermatitis atópica) u otras lesiones de la piel.

Inyección de EBGLYSS

1º Retira la Tapa de la Aguja

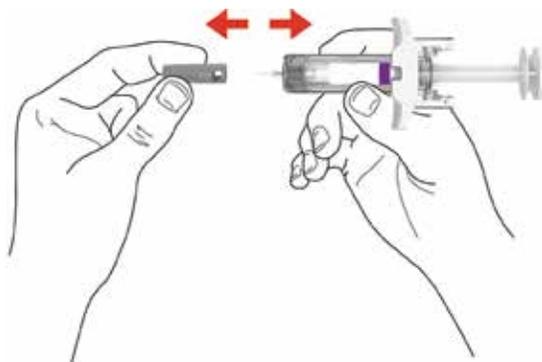


Sujeta la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS por el centro de su Cuerpo y retira la Tapa de la Aguja.

No vuelvas a colocar la Tapa de la Aguja, ya que esta podría dañar la aguja.

No toques la Aguja.


2º Pellizca la zona de inyección e inserta la Aguja

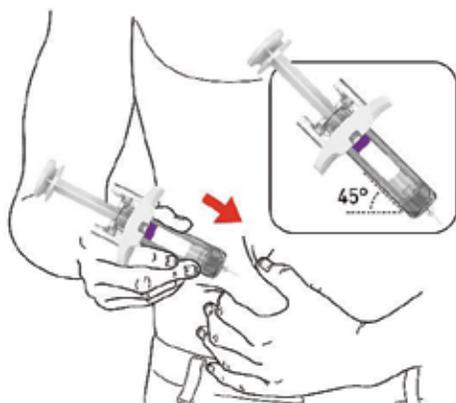

Pellizca suavemente un pliegue de piel en la zona de la inyección con una mano.

Con la otra mano, introduce la Aguja completamente en el pliegue de piel formando un ángulo de 45°.

3º Presiona el Émbolo

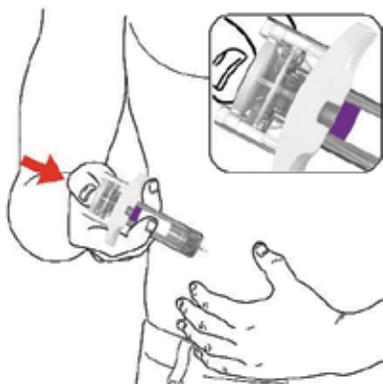


Suelta la piel con suavidad mientras mantienes la aguja en su lugar. Presiona la Barra del Émbolo hasta el fondo para inyectar toda la medicina.

Nota: Es normal que se sienta un poco de resistencia.

Debes administrar la dosis completa para activar el Protector de la Aguja.

4°

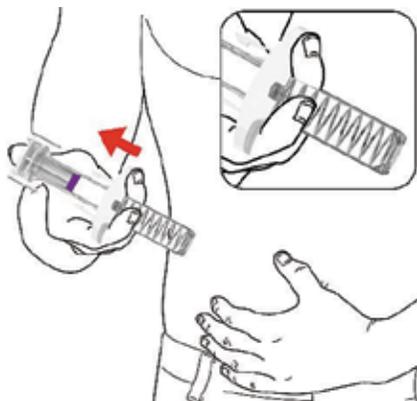Suelta la Barra del Émbolo

Levanta el pulgar para soltar la Barra del Émbolo hasta que la Aguja quede cubierta por el Protector de la Aguja.

Presiona con suavidad una bola de algodón o una gasa en la zona de inyección si ves sangre.

No te frotes la piel después de la inyección.

Eliminación de EBGLYSS

Desecha (tira) la Jeringuilla Precargada usada.



Inmediatamente después de utilizar la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS, colócala junto con la Tapa de la Aguja en un recipiente para desechar objetos cortopunzantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

No deseches (tires) la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS en la basura doméstica.

Si no tienes un recipiente para eliminación de objetos cortopunzantes autorizado por la FDA, puedes utilizar un recipiente de basura del hogar que:

- esté hecho de plástico de alta resistencia;
- pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
- pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
- sea resistente a filtraciones; y
- esté adecuadamente etiquetado con la advertencia de que el recipiente contiene residuos peligrosos.

Cuando el recipiente para desechar objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberás seguir las normas de la comunidad para desecharlo correctamente.

Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringuillas utilizadas.

Para obtener más información sobre cómo desechar de manera segura objetos cortopunzantes e información específica sobre cómo desecharlos en el estado en el que resides, consulta el sitio web de la FDA: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.

No recicles el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes usado.

Almacenamiento de EBGLYSS

- Almacena tu Jeringuilla Precargada en un refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (de 2 °C a 8 °C).
- EBGLYSS se puede almacenar a temperatura ambiente por un máximo de 7 días en el envase original. **No** la almacenes a más de 86 °F (30 °C). Desecha EBGLYSS que haya estado a temperatura ambiente por más de 7 días.
- Almacena tu Jeringuilla Precargada en el envase original para protegerla de la luz hasta el momento de su uso.
- **No** congeles la Jeringuilla Precargada. **No** agites tu Jeringuilla Precargada.
- **No** pongas la Jeringuilla Precargada en el microondas, no dejes correr agua caliente sobre ella ni la dejes bajo la luz solar directa.
- Desecha (elimina) tu Jeringuilla Precargada si no se cumple alguna de las condiciones anteriores.

Mantén tus Jeringuillas Precargadas y todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Si tienes más preguntas sobre cómo utilizar la Jeringuilla Precargada de EBGLYSS, haz lo siguiente:

- Llama a tu profesional de la salud
- Llama al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979)
- Visita www.ebglyss.com



Escanea este código para ir al sitio web
www.ebglyss.com

Lee la Información del Paciente de EBGLYSS dentro de esta caja para obtener más información sobre la medicina.

Lilly

Eli Lilly and Company
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.
Número de Licencia en Estados Unidos 1891

EBGLYSS es una marca registrada de Eli Lilly and Company.

Derechos de autor © 2024, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Emitido: Septiembre del 2024

PP-LK-US-0448 Leбри PFS IFU