

INSTRUCCIONES DE USO
MOUNJARO™ (mown-JAHR-OH)
(tirzepatida)
inyección para uso subcutáneo

pluma de dosis única de 2.5 mg/0.5 ml
pluma de dosis única de 5 mg/0.5 ml
pluma de dosis única de 7.5 mg/0.5 ml
pluma de dosis única de 10 mg/0.5 ml
pluma de dosis única de 12.5 mg/0.5 ml
pluma de dosis única de 15 mg/0.5 ml
administrar 1 vez por semana



Información importante que debe saber antes de aplicar la inyección de MOUNJARO

Lea estas Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de utilizar la pluma MOUNJARO y cada vez que surta una receta. Puede haber información nueva. Esta información no sustituye una conversación con su profesional de la salud acerca de su afección médica o tratamiento.


Converse con su profesional de la salud acerca de cómo aplicar correctamente la inyección de MOUNJARO.

- MOUNJARO es una pluma precargada de dosis única.
- MOUNJARO se administra 1 vez por semana.
- Inyectar solo debajo de la piel (por vía subcutánea).
- Usted u otra persona puede inyectarse en el estómago (abdomen) o muslo.
- Otra persona puede inyectarse en la zona posterior de la parte superior del brazo.

Almacenamiento y manipulación

- Guarde su Pluma en el refrigerador a una temperatura de entre 36 °F y 46 °F (de 2 °C a 8 °C).
- Puede almacenar su Pluma a una temperatura ambiente de hasta 86 °F (30 °C) durante un máximo de 21 días.
- **No** congele su Pluma. Si la Pluma se ha congelado, deséchela y use una nueva.
- Almacene su Pluma en el envase original para protegerla de la luz.
- La Pluma tiene piezas de vidrio. Manipúlela con cuidado. Si se le cae la Pluma en una superficie dura, **no** la utilice. Use una nueva Pluma para su inyección.
- Mantenga su Pluma MOUNJARO y todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Guía de piezas

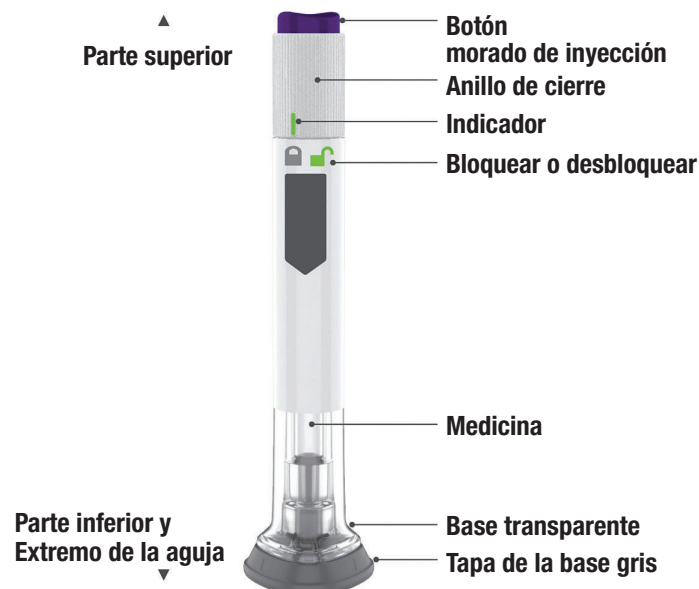

Preparación para inyectar MOUNJARO

Retire la Pluma del refrigerador.

Deje la tapa de la base gris puesta hasta que esté listo para inyectarse.

Verifique la etiqueta de la Pluma para asegurarse de que tenga la medicina y la dosis correctas, y que la medicina no haya vencido.

Inspeccione la Pluma para asegurarse de que no esté dañada.



Asegúrese de que la medicina:

- no esté congelada
- sea incolora a ligeramente amarilla
- no esté turbia
- no tenga partículas.

Lávese las manos.

Paso

1

Elija su lugar de inyección


Su profesional de la salud puede ayudarle a elegir el lugar de la inyección que sea más conveniente para usted.

Usted u otra persona puede aplicar la inyección de la medicina en el estómago (abdomen) o muslo.

Otra persona debe administrarle la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

Cambie (varíe) el lugar de la inyección semanalmente.

Puede utilizar la misma zona de su cuerpo, pero asegúrese de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

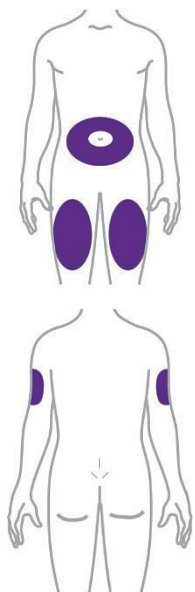

Paso

2

Retire la tapa de la base gris


Asegúrese de que la Pluma esté **bloqueada**.

No desbloquee la Pluma hasta que coloque la base transparente sobre la piel y esté listo para inyectarse.

Quite la tapa de la base gris tirando firmemente de ella y deséchela en la basura doméstica.

No coloque nuevamente la tapa de la base gris, pues podría dañar la aguja.


No toque la aguja.

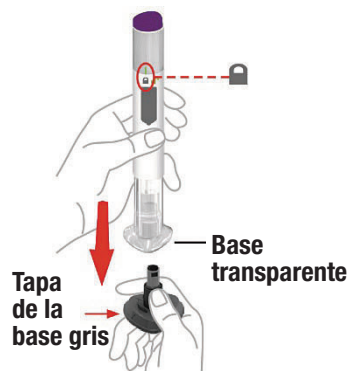


Paso 3

Coloque la base transparente sobre la piel y, a continuación, desbloquee

Coloque la base transparente de forma plana contra la piel en el lugar de la inyección.

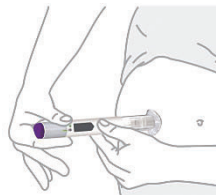

Desbloquee girando el anillo de bloqueo.

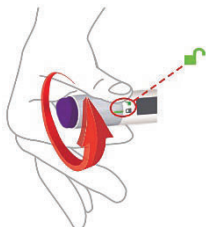

Paso 4


Mantenga presionado hasta 10 segundos

Mantenga presionado el botón morado de inyección por hasta 10 segundos.

Escuche lo siguiente:

- Primer clic = se inició la inyección
- Segundo clic = finalizó la inyección

Sabrás que se ha administrado la inyección de forma completa cuando vea el émbolo gris.

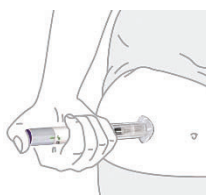

Después de la inyección, coloque la Pluma utilizada en un recipiente para objetos punzocortantes.

Consulte **Eliminación de las Plumas utilizadas.**

Eliminación de las Plumas utilizadas

- Coloque la Pluma utilizada en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) de Estados Unidos inmediatamente después de su uso. **No** deseche (elimine) Plumas en la basura doméstica.
- Si no dispone de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puede utilizar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
 - esté hecho de plástico de alta resistencia;
 - pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
 - pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
 - sea resistente a derrames y
 - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberá seguir las normas comunitarias para desechar el recipiente correctamente. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringas usadas. Para obtener más información acerca de la eliminación segura de objetos punzocortantes y obtener información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el Estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicle el recipiente usado.

Preguntas Frecuentes

¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi Pluma?

Las burbujas de aire son normales.

¿Qué ocurre si mi Pluma no está a temperatura ambiente?

No es necesario calentar la Pluma a temperatura ambiente.

¿Qué pasa si desbloqueo la Pluma y presiono el botón morado de la inyección antes de quitar la tapa de la base gris?

No retire la tapa de la base gris. Tire la Pluma y use una nueva.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando retiro la tapa de la base gris?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal. **No** toque la aguja.


¿Debo mantener presionado el botón de la inyección hasta administrar completamente la inyección?

No es necesario, pero puede ayudarlo a mantener la Pluma estable contra su piel.

Escuché más de 2 clics durante la inyección: 2 clics fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?

Algunas personas pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la Pluma. **No** quite la Pluma de su piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

No estoy seguro de que la Pluma funcione correctamente.

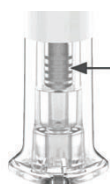

Émbolo
gris

Verifique si recibió la dosis. Su dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible. También, consulte el **Paso 4** de las instrucciones.

Si no ve el émbolo gris, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacene su Pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?

Es normal. Presione el lugar de inyección con una bola de algodón o una gasa. **No** frote el lugar de inyección.

Otra información

- Si tiene problemas de visión, **no** utilice la Pluma sin ayuda de alguien capacitado para utilizar la Pluma MOUNJARO.

Dónde obtener más información

- Si tiene preguntas o problemas con su Pluma MOUNJARO, comuníquese con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llame a su profesional de la salud.
- Para obtener más información sobre la Pluma MOUNJARO, visite nuestro sitio web en www.mounjaro.com.



Escanee este código para ir al sitio web
www.mounjaro.com

Comercializado por:
Lilly USA, LLC
Indianapolis, IN 46285, EE. UU.

MOUNJARO es una marca comercial de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2022, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Aprobado: Mayo del 2022

MOU-0001-IFU-20220513

PP-TR-US-0313