

INSTRUCCIONES DE USO
ZEPBOUND™ (ZEP-Baund)
(tirzepatida)
inyección para uso subcutáneo



pluma de dosis única de 2.5 mg/0.5 ml
 pluma de dosis única de 5 mg/0.5 ml
 pluma de dosis única de 7.5 mg/0.5 ml
 pluma de dosis única de 10 mg/0.5 ml
 pluma de dosis única de 12.5 mg/0.5 ml
 pluma de dosis única de 15 mg/0.5 ml
 administrar 1 vez por semana


Información importante que debes saber antes de aplicar la inyección de ZEPBOUND

Lee estas Instrucciones de Uso y la Guía del Medicamento antes de utilizar la Pluma ZEPBOUND y cada vez que surtas una receta. Podría haber información nueva. Esta información no sustituye una conversación con tu profesional de la salud acerca de tu afección médica o tratamiento.

Conversa con tu profesional de la salud acerca de cómo inyectar correctamente ZEPBOUND.

- ZEPBOUND es una pluma precargada de dosis única.
- ZEPBOUND se administra 1 vez por semana.
- Solo debe inyectarse debajo de la piel (por vía subcutánea).
- Tú u otra persona pueden aplicar la inyección en el estómago (abdomen) o muslo.
- Otra persona puede aplicar la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

Guía de piezas

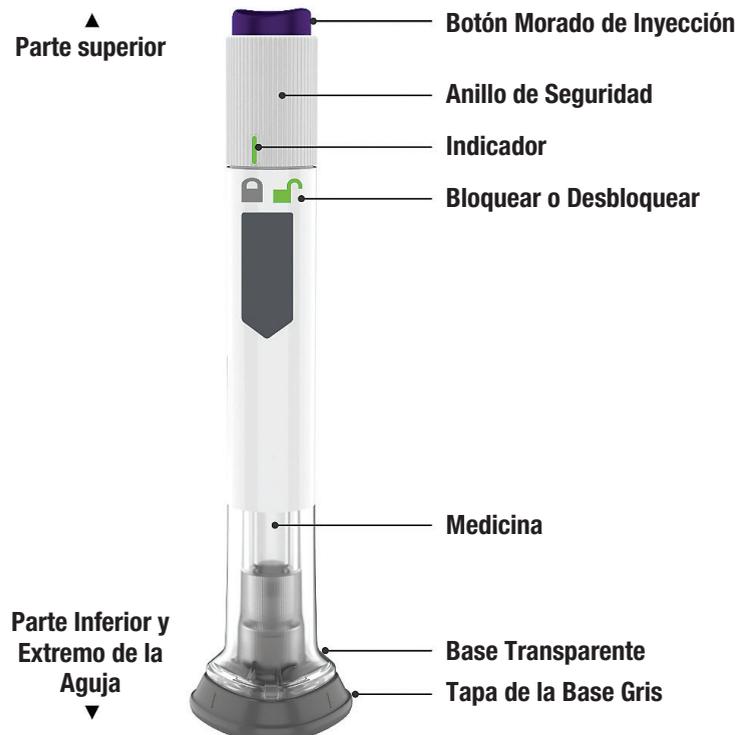

Preparación para inyectar ZEPBOUND

Retira la pluma del refrigerador.

Deja la tapa de la base gris puesta hasta que estés listo para inyectarte.

Verifica la etiqueta de la pluma para asegurarte de que tenga la medicina y la dosis correctas, y que la medicina no haya vencido.

Inspecciona la pluma para asegurarte de que no esté dañada.



Asegúrate de que la medicina:

- no esté congelada
- sea incolora a ligeramente amarilla
- no esté turbia
- no tenga partículas


Lávate las manos.

Paso 1

Elige el lugar de inyección

Tu profesional de la salud puede ayudarte a elegir el lugar de inyección que sea más conveniente para ti.


Tú u otra persona pueden aplicar la inyección de la medicina en el estómago (abdomen) o muslo.

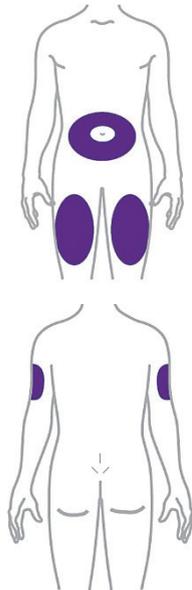

Otra persona debe administrarte la inyección en la zona posterior de la parte superior del brazo.

Cambia (varía) el lugar de la inyección semanalmente.

Puedes utilizar la misma zona del cuerpo, pero asegúrate de elegir un lugar diferente para la inyección en esa zona.

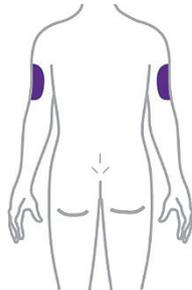


Paso 2

Retira la tapa de la base gris

Asegúrate de que la pluma esté **bloqueada**.

No desbloquee la pluma hasta que hayas colocado la base transparente sobre la piel y estés listo para inyectarte.

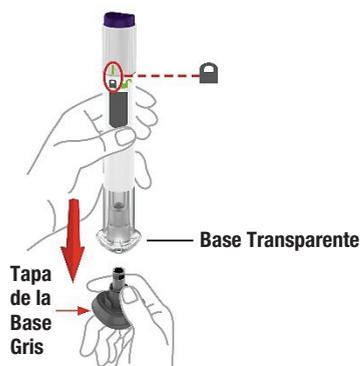


Quita la tapa de la base gris tirando firmemente de ella y deséchala en la basura doméstica.

No coloques nuevamente la tapa de la base gris, ya que podrías dañar la aguja.


No toques la aguja.

**Paso
3**

Coloca la base transparente sobre la piel y, a continuación, desbloquea

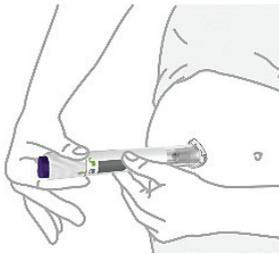


Coloca la base transparente de forma plana contra la piel en el lugar de la inyección.

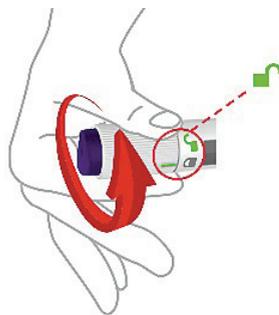

Desbloquea girando el anillo de seguridad.

**Paso
4**

Mantén presionado hasta 10 segundos

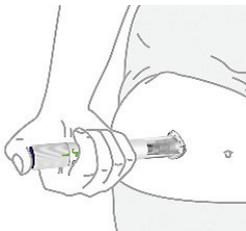

Mantén presionado el botón morado de inyección por hasta 10 segundos.

Escucha lo siguiente:

- Primer clic = se inició la inyección
- Segundo clic = finalizó la inyección



Sabrás que te has administrado la inyección de forma completa cuando veas el émbolo gris.

Después de la inyección, coloca la pluma utilizada en un recipiente para objetos punzocortantes.

Consulta la guía **Eliminación de las plumas utilizadas**.

Eliminación de las plumas utilizadas

- Coloca tus plumas usadas en un recipiente para objetos punzocortantes aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) inmediatamente después de su uso. **No** deseches (elimines) plumas en la basura doméstica.
- Si no dispones de un recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes aprobado por la FDA, puedes utilizar un recipiente doméstico que cumpla con los siguientes requisitos:
 - esté hecho de plástico de alta resistencia;
 - pueda cerrarse con una tapa ajustada y sea resistente a las perforaciones, de modo que los objetos punzocortantes no se puedan salir;
 - pueda colocarse en posición vertical y mantenerse estable durante el uso;
 - sea resistente a derrames y
 - tenga una etiqueta que advierta que el recipiente contiene residuos peligrosos.
- Cuando tu recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes esté casi lleno, deberás seguir las normas comunitarias para desecharlo de manera correcta. Pueden existir leyes locales o estatales sobre cómo desechar agujas y jeringuillas usadas. Para obtener más información acerca de la eliminación segura de objetos punzocortantes, así como información específica sobre la eliminación de objetos punzocortantes en el Estado en que vives, visita el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** recicles el recipiente para la eliminación de objetos punzocortantes usado.

Almacenamiento y manejo

- Guarda tu pluma en el refrigerador entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C).
- Puedes almacenar tu pluma a una temperatura ambiente de hasta 86 °F (30 °C) durante un máximo de 21 días. Si almacenas la pluma a temperatura ambiente, no la vuelvas a poner en el refrigerador.
- Desecha la pluma si no se utiliza en el plazo de 21 días después de retirarla del refrigerador.
- **No** congeles tu pluma. Si se congeló la pluma, deséchala y usa una nueva.
- Almacena tu pluma en el envase original para protegerla de la luz.
- La pluma tiene partes de vidrio. Manipúlala con cuidado. Si se te cae la pluma en una superficie dura, **no** la utilices. Usa una pluma nueva para la inyección.
- Mantén tu pluma ZEPBOUND y todas las medicinas fuera del alcance de los niños.

Preguntas Frecuentes

¿Qué sucede si veo burbujas de aire en mi pluma?

Las burbujas de aire son normales.

¿Qué ocurre si mi pluma no está a temperatura ambiente?

No es necesario calentar la pluma a temperatura ambiente.

¿Qué pasa si desbloqueo la pluma y presiono el botón morado de la inyección antes de quitar la tapa de la base gris?

No retires la tapa de la base gris. Desecha la pluma y usa una nueva.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido en la punta de la aguja cuando retiro la tapa de la base gris?

Una gota de líquido en la punta de la aguja es normal. **No** toques la aguja.

¿Debo mantener presionado el botón de inyección hasta administrar completamente la inyección?

No es necesario, pero puede ayudarte a mantener la pluma estable contra tu piel.

Escuché más de 2 clics durante la inyección: 2 clics fuertes y 1 suave. ¿Me administré la inyección completa?

Algunas personas pueden escuchar un clic suave justo antes del segundo clic fuerte. Es el funcionamiento normal de la pluma. **No** quites la pluma de tu piel hasta escuchar el segundo clic fuerte.

No estoy seguro de que la pluma funcionó correctamente.



Verifica si recibiste la dosis. Tu dosis se administró correctamente si el émbolo gris es visible. También, consulta el **Paso 4** de las instrucciones.

Si no ves el émbolo gris, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) para obtener más instrucciones. Hasta entonces, almacena tu pluma de forma segura para evitar un pinchazo accidental.

¿Qué pasa si hay una gota de líquido o sangre en mi piel después de aplicar la inyección?

Es normal. Presiona la zona de inyección con una bola de algodón o una gasa. **No** frotes el lugar de inyección.

Otra información

- Si tienes problemas de visión, **no** utilices la pluma sin ayuda de alguien capacitado para utilizar la pluma ZEPBOUND.

Dónde obtener más información

- Si tienes preguntas o problemas con tu pluma ZEPBOUND, comunícate con Lilly al 1-800-Lilly-Rx (1-800-545-5979) o llama a tu profesional de la salud.
- Para obtener más información sobre la pluma ZEPBOUND, visita nuestro sitio web en www.zepbound.com.



Escanea este código para acceder a
www.zepbound.com

Comercializado por:
Lilly USA, LLC
Indianápolis, IN 46285, EE. UU.

ZEPBOUND es una marca comercial de Eli Lilly and Company.

Copyright © 2023, Eli Lilly and Company. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de Uso cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Revisado en: noviembre del 2023

ZEP-0002-PEN-IFU-20231109

PP-ZP-US-0319

The Lilly logo, featuring the word "Lilly" in a red, cursive script font.